

# Carbon Rollator

Sicher und ultraleicht gehen



Der Leichtgewicht-Rollator

## Sicher und ultraleicht gehen. Carbon Rollator

### Genießen Sie einen sicheren Spaziergang mit dem leichten Carbon Rollator

- Nur 5,8 kg Gewicht: Leicht zu schieben und zu manövrieren. Sie überwinden Bordsteinkanten mit Leichtigkeit.
- Reflektoren an Rahmen und Rad: Sie sind bei Dunkelheit und Dämmerung perfekt sichtbar.
- Einzigartiges, geschwungenes Design, im Stil der 50er Jahre: Für alle, die das Besondere lieben.
- Griffe aus Kork: Sie sind, auch bei schwitzigen Händen, rutschfest.  
Genießen Sie das natürliche Gefühl und die stoßdämpfende Wirkung.



Sehr leichter  
Rollator

Sichtbarkeit bei Dunkelheit



Einfacher Transport



Rollator rollt nicht weg  
beim Bergabgehen



### Rahmen



British Racing  
Green



Midnight  
Blue



Star  
Silver

### Größen



**Klein**  
<1,60 m Körpergröße

**Medium**  
>1,60 m Körpergröße

**Griffe aus Kork**  
 Natürliches Gefühl und stoßdämpfend.  
 Schont Ihre Arme und Handgelenke.

**Mit nur einer Hand abnehmbare Tasche**  
 Halten Sie sich mit der einen Hand am Griff fest.  
 Mit der anderen Hand nehmen Sie die Tasche ab.

**Gelände-Reifen**  
 Trekkingreifen geben mehr Halt und Komfort für Stadt und Land.  
 Das Reifenprofil gibt Halt auf weichen Wegen.



**Gangschaltung**  
 Schleifbremsen hindern den Rollator am Wegrollen, beim bergab gehen.  
 Sie nutzen Ihre Kraft zum sicheren Gehen, anstatt sich bergab auf das Festhalten des Rollators zu konzentrieren.

**Stockhalter**  
 Sie bewahren Ihren Stock während Ihres Spaziergangs sicher auf.  
 Sie bleiben flexibel: Ihr Spazierstock ist jederzeit einsatzbereit.

**Über 30 Reflektoren**  
 Sie werden bei Dunkelheit gesehen.  
 Sie sind sicher und sichtbar – egal zu welcher Tageszeit.

Carbon Rollator	CR 54	CR 62
Empfohlen für Körpergröße	<165 cm Körpergröße	>165 cm Körpergröße
Maximales Benutzergewicht	150 kg	150 kg
Maximale Beladung der Tasche	5 kg	5 kg
Breite: offen	62 cm	62 cm
Breite: geschlossen	22 cm	22 cm
Sitzbreite	45 cm	45 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm
Gesamtgewicht	5,8 kg	5,8 kg
Maximale Griffhöhe	88 cm	103 cm
Minimale Griffhöhe	76 cm	81 cm


## Gangschaltung: Sicher bergab gehen

Bei dem Carbon Rollator ist die Gangschaltung mit Fußpedal serienmäßig dabei. Das bedeutet, dass Sie einen individuellen Rollwiderstand über die Schleifbremse einstellen können. Dafür müssen Sie mit dem Fuß leicht auf den roten Hebel an den Hinterrädern treten oder nach oben drücken, so können Sie den Rollwiderstand zu- oder abschalten. Mit der Gangschaltung an den Hinterrädern lässt sich so, also die Gehgeschwindigkeit reduzieren.

## Unser Mutmacher Peter Spendler zu der Gangschaltung:



„Ich stolpere aufgrund einer Fußhebeschwäche häufig und bin vor allem auf abschüssigen Wegen recht unsicher. Gerade beim Bergabfahren hilft mir die Schleifbremse des Rollators besonders, weil ich damit die Gehgeschwindigkeit reduzieren kann und mich deutlich sicherer fühle. Wie eine Gangschaltung kann ich sie leicht mit meinem Fuß zu- und abschalten. Toll!“

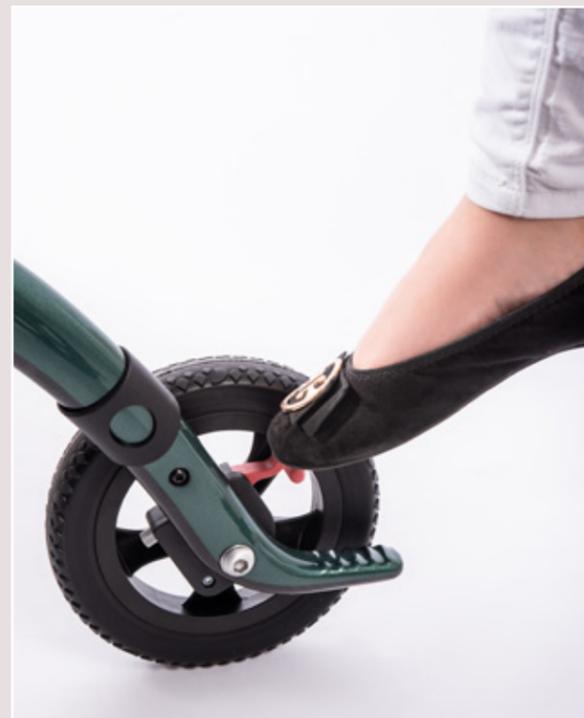

## Reifen der Rollatoren

Carbon Rollatoren haben eine spezial Bereifung, die dem Komfort einer Luftbereifung sehr nahe kommen und trotzdem pannensicher sind. Hier werden die Unebenheiten abgefedert und nicht direkt auf die Hände übertragen.

So kommt es weniger zu Muskelkater in den oberen Extremitäten. Zusätzlich verhindern auch spezielle Schiebegriffe aus Kork die Übertragung und schonen so zusätzlich.



## Größe und Einstellung

Sollten Sie sich beim Stehen oder Bücken unsicher fühlen, bitten Sie einen Sanitätshausmitarbeiter, einen Angehörigen, einen Physiotherapeuten oder eine Pflegefachkraft um Hilfe beim abmessen.

### 1. Messen Sie die Stützhöhe (B)

Abstand vom Boden bis zum Ende des Handballens messen:  
Aufrechte Haltung, Arme locker hängen lassen.

**Wichtig ist eine leichte Beugung der Arme, wenn Sie sich auf den Rollator stützen.**


### 2. Messen Sie die Unterschenkellänge (C)

Abstand vom Boden bis zum Beginn der Kniebeuge messen:  
Aufrechte Haltung, Beine gestreckt.

**Wichtig ist, dass Ihre Fußsohlen den Boden berühren, wenn Sie auf dem Rollator sitzen. Sie können sich für die Messung auch auf einen Stuhl setzen.**

### 3. Vergleichen Sie Ihre Messung mit der Beispiel-Tabelle

Super, Sie haben Ihre richtige Größe gefunden!

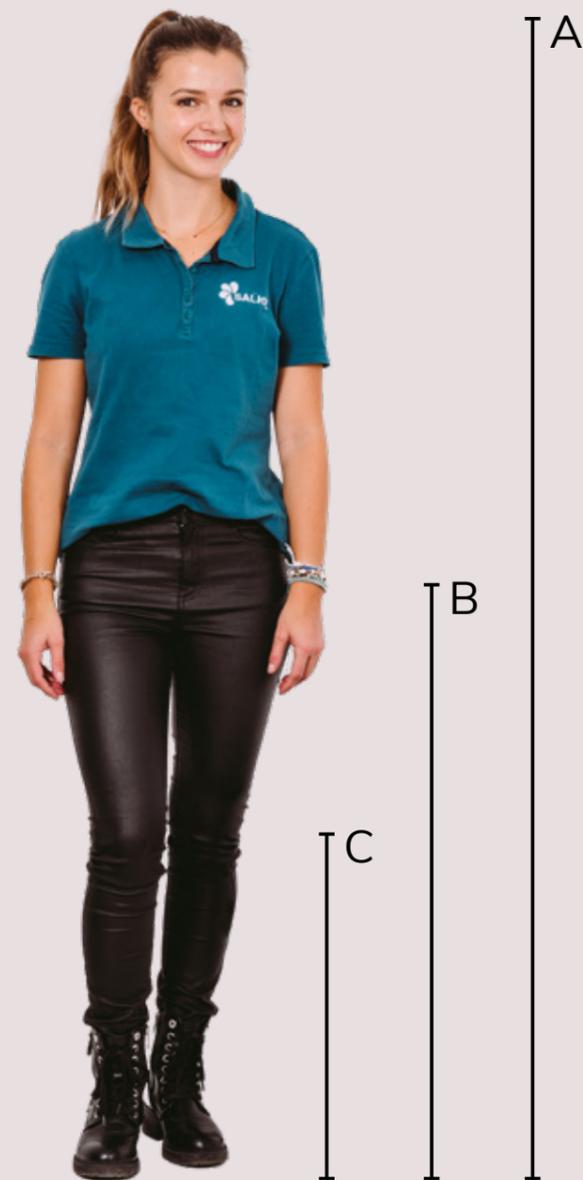

## Größentabelle Carbon Rollator

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit Werten. Vergleichen Sie diese mit Ihren abgemessenen Maßen. Das wird Ihnen helfen, die richtige Größe für Ihren neuen Carbon Rollator zu bestimmen.

Carbon Rollator	Sitzhöhe CR 54 cm	Sitzhöhe CR 62 cm	Sitzhöhe CR 62 cm
A) Körpergröße	160 cm	175 cm	190 cm
B) Boden bis Handballen	78 cm	89 cm	94 cm
C) Unterschenkellänge	36 cm	46 cm	53 cm
Griffhöhe Eingestellt	82 cm	92 cm	94 cm
Griffhöhe Min-Max.	76 - 88 cm	80,5 - 103 cm	80,5 - 103 cm

## Die richtige Stützhöhe für sicheres gehen

Die Handgriffe des Carbon Rollators können Sie von Stufe 1 bis Stufe 9 einstellen.

**Wichtig**  
Leichte Armbeugung




## Die richtige Sitzhöhe für sicheres Sitzen

**Wichtig**  
Fußsohlen müssen Boden berühren.



Rollator-Schnellstart. Darauf müssen Sie achten.

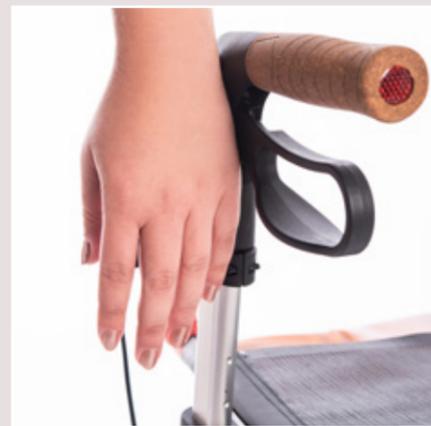

### 1. Einstellung der korrekten Griffhöhe

Stellen Sie sich nahe an den Rollator. Lassen Sie die Arme locker baumeln und beugen Sie sie leicht. Die Höhe Ihrer Daumenballen entspricht nun der korrekten Höhe der Schiebegriffe.



### 2. Gehen mit Rollator

Stellen Sie sich nahe an den Rollator, direkt vor das Sitznetz. Während Sie gehen, sollte Ihr Rücken aufrecht bleiben. Ihr Körper bleibt zwischen den Griffen positioniert.



### 3. Bordsteinkanten überwinden

Fahren Sie direkt an die Bordsteinkante. Treten Sie mit dem Fuß auf die Ankipphilfe. Der Rollator wird nun angehoben. Schieben Sie den Rollator mit Fuß und Armen nach vorne und stellen Sie die Vorderräder auf dem Gehsteig ab. Fahren Sie mit den Hinterrädern nach vorne bis zur Kante und heben diese dann vorsichtig nach oben. Ziehen Sie die Bremsen an und steigen Sie selber hoch auf den Bordstein.




### 4. Nutzung der Bremsen

Um den Rollator zu bremsen, ziehen Sie die Bremsgriffe nach oben in Richtung Schiebegriffe.



Um die Parkbremse zu betätigen, drücken Sie die Bremsgriffe nach unten bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören.

## Magnetischer Stockhalter

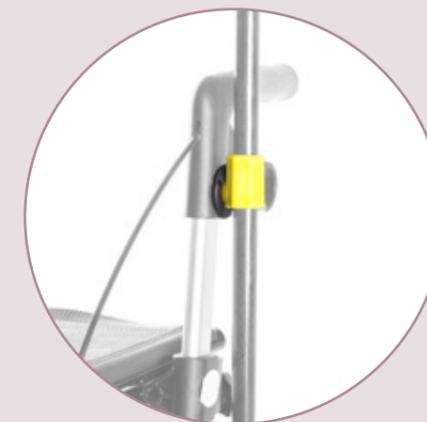

Benötigen Sie einen zweiten Stockhalter, empfehlen wir Ihnen unseren magnetischen Stockhalter Held. Die Manschette wird einfach an dem Stock oder der Unterarmgehstütze befestigt. Den Taler und das Körbchen zum Hineinstellen befestigen Sie am Rollator. Schon können Sie Ihren zweiten Stock ebenfalls am Rollator befestigen und haben ihn immer griffbereit. Zudem haftet der Magnetstockhalter Held auch an allen eisenhaltigen Gegenständen. Sie können den Stock also auch an einem Türstock, oder einem Heizkörper anlehnen, ohne dass er umfällt.

## Zusätzlicher Stockhalter



Die Stockhalterung lässt sich einfach am Rahmen und der Höhenverstellung des Rollators befestigen. Klicken Sie zunächst das Körbchen an der Innenstange von unten an und drehen dieses nach außen um. Fixieren Sie das Körbchen mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben.


Als nächstes befestigen Sie die Zwingen an der Höhenverstellung des Rollators (unterhalb der Handgriffe) mit Hilfe der anderen beiden Schrauben. Alternativ können Sie auch den Taler verwenden. (Siehe Stockhalter-Set magnetisch).

## Die moderne Tasche für Ihren Rollator von Jost

**JOST**

Jost ist die Idee von Dietmar Jost. Er kreierte die Marke im Jahr 2002 für Menschen, die modernes, ausgewähltes und qualitativ hochwertiges Design bei Taschen und Lederwaren suchen. Der Großteil der zeitlosen Taschen wird in Europa produziert, aus europäischen Ledern und Geweben, teilweise sogar in Handarbeit.

Die ideale Tasche für Ihren Rollator ist stabil, modern und individuell einsetzbar. Sie können die Tasche nicht nur an Ihrem Rollator einhängen, sondern auch als ganz normale Handtasche / Umhängetasche nutzen.

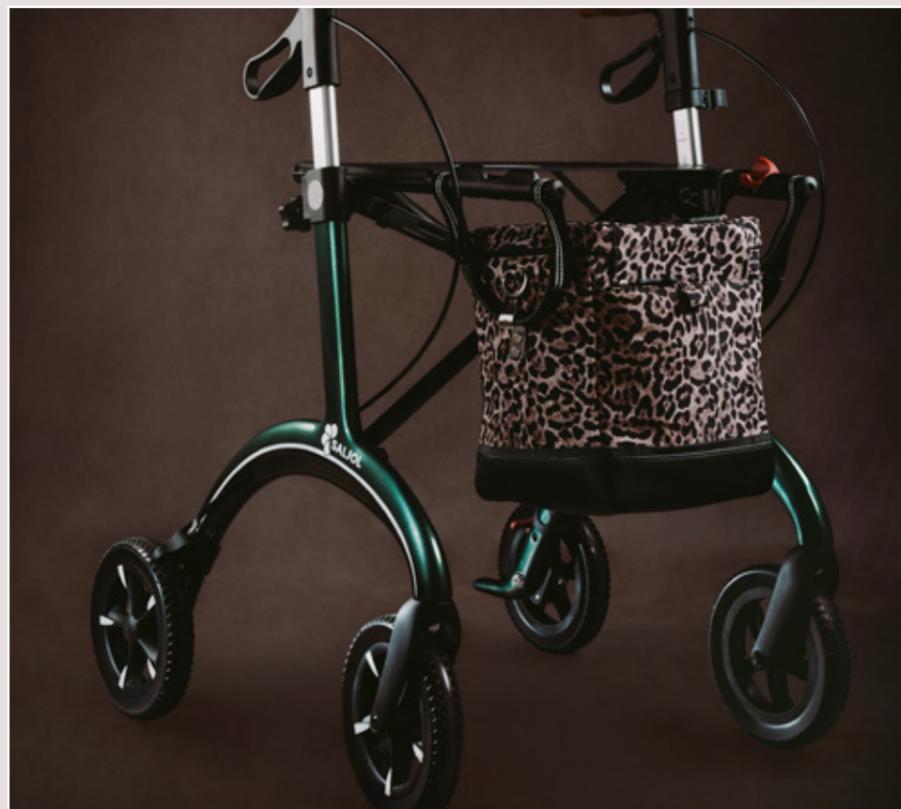


### Aufhängung



Die Tasche können Sie an unserem Carbon Rollator einhängen. Sie kann schnell und einfach eingehängt und abgenommen werden. Mit Hilfe der Klettverschlüsse an den Taschenhenkeln und den Haken an der Seite der Tasche einfach an den zwei Stangen einhängen.

### Taschendeckel nach vorne wegklappen

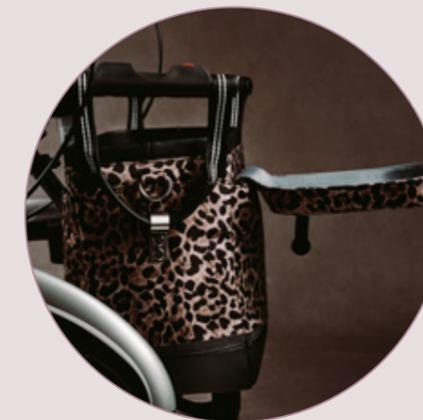

Für einen leichten Einblick in die Tasche, müssen Sie den Deckel nach vorne wegklappen. Also bewegt sich der Deckel weg von Ihnen, während Sie in Ihrem Rollator stehen. Jetzt können Sie einen Blick in Ihre Tasche werfen. Und trotzdem sicher in Ihrem Rollator stehen.

### Transparenter Taschendeckel



Auf dem Taschendeckel haben Sie eine durchsichtige Tasche. Diese wird mit einem Reißverschluss geschlossen. Hier können Sie zum Beispiel Ihr Busticket oder Ihr Smartphone unterbringen.

## LED Lampe



Mit der hellen LED-Lampe sind Sie im Dunklen gut sichtbar. Außerdem leuchtet Ihnen die Lampe den Weg und weißt Sie somit auf Hindernisse hin. Mit einer zweiten LED Lampe können Sie den Fußraum ausleuchten. So sehen Sie auch kleinere Hindernisse und z.B. Hundehaufen. Klappen Sie den Haken aus der Halterung an der Rückseite der Lampe nach oben und führen Sie den Haken in die dafür vorgesehene Schlaufe an der Rollator-Tasche. An der unteren Seite der Lampe können Sie diese anschalten. Die LED-Lampe ist auch an vielen anderen Einsatzorten universal nutzbar. Einfach, weil Batterie betrieben.

## Regenschirm



Mit einem Regenschirm werden Sie bei schlechtem Wetter nicht nass. Dieser Regenschirm hat den zusätzlichen Vorteil, dass er an Ihrem Rollator links oder rechts befestigt werden kann. So können Sie beide Hände an den Handgriffen Ihres Rollators lassen und sind sicher und trocken unterwegs.

### **Einstellung und Befestigung sind einfach.**

Mit zwei Gelenken bestimmen Sie die Position und Neigung des Schirms, damit Sie nicht nass werden. Bei schönem Wetter klappen Sie ihn einfach weg, oder nutzen ihn als leichten Sonnenschutz.

## Tasche



Tasche Schwarz

Designertasche von JOST  
Schwarz oder Leoprint

Die Tasche lässt sich durch den Magnetverschluss mit einer Hand leicht öffnen und schließen. Links und rechts an der Seite befindet sich ein Netz, z.B. für Flaschen.

Die Tasche hängen Sie ganz einfach ein und können sie mit einer Hand abnehmen. Durch das helle Innenfutter und die drei separaten Fächer, finden Sie Ihre Habseligkeiten leichter.

## Klingel



Mit der Klingel können Sie sich mit einem lauten Klang im Straßenverkehr bemerkbar machen.

Die Rollator Klingel wird einfach neben dem Handgriff angeschraubt und Sie können losklingeln.

So werden Fußgänger und vorbeifahrende Fahrzeuge Ihren Klingelton deutlich hören, was das Fahren sicherer macht.

## Verstellbarer Rückengurt



Ein Rückengurt ist sehr angenehm, wenn Sie Ihren Rollator auch viel zum Sitzen verwenden. Sie können sich bequem anlehnen und es besteht keine Gefahr, dass Sie nach hinten umkippen.

Befestigen Sie den Rückengurt mit den mitgelieferten Schrauben, sowie dem Imbusschlüssel an den Innenseiten der Handgriffe des Rollators. Durch die Verstellbarkeit des Rückengurts können Sie die ideale Position für sich finden. Auch für große Menschen geeignet.

## Gepolsterter Sitz



Der gepolsterte Sitz verbessert Ihren Halt, wenn Sie auf dem Rollator sitzen. Sie sitzen aufrecht und sicher.

Außerdem ist er sehr komfortabel und bequem. Legen Sie den Sitz einfach auf das Sitznetz des Rollators und befestigen Sie diesen, indem Sie leicht drücken bis die Klammern unter die Sitzstangen greifen. Für den Transport einfach in die Rollatortasche legen.

## Echtholz-Tablett



Mit Hilfe eines Tablett lassen sich verschiedene Dinge leicht transportieren. So wird Ihr Rollator zum Servierwagen. Legen Sie das Tablett mit der breiten Seite nach vorne auf die Sitzfläche des Rollators und achten Sie darauf, dass die Aussparungen links und rechts auf den Sitzstangen liegen. Ein Anti-Rutsch-Netz erhöht die Sicherheit.

Produktbeschreibung	Artikelnummer	Preis	Stück
SALJOL Carbonrollator, 62 cm, British Racing Green	4058789009031	599,00€	
SALJOL Carbonrollator, 62 cm, Midnight Blue	4058789009048	599,00€	
SALJOL Carbonrollator, 62 cm, Star Silver	40587 89009055	599,00€	
SALJOL Carbonrollator, 54 cm, British Racing Green	4058789009437	599,00€	
SALJOL Carbonrollator, 54 cm, Midnight Blue	4058789009444	599,00€	
SALJOL Carbonrollator, 54 cm, Star Silver	4058789009451	599,00€	
Stockhalter-Set magnetisch	4058789009659	29,00€	
Stockhalterung Standard	4058789009284	19,00€	
LED Lampe	4058789009093	9,90€	
Regenschirm, schwarz	4058789009215	69,00€	
Klingel, rot	4058789009222	9,90€	
Tasche, schwarz	4058789009260	39,00€	
Jost Tasche, schwarz	4058789012048	129,00€	
Jost Tasche, leopard	4058789012055	129,00€	
Rückengurt, einstellbar, schwarz	4058789009185	39,00€	
Fester Sitz, schwarz	4058789009635	39,00€	
Echtholz-Tablett	4058789009642	49,00€	
<b>Gesamtpreis:</b>			

Name

Vorname

Straße

PLZ / Ort:

Telefon

E-mail

Bemerkung

Datum

Unterschrift



SALJOL



@saljolgmbh



SALJOL GmbH