

# In drei Schritten finden Sie die richtige Größe für Ihren Page Wohnraumrollator

1. Wie möchten Sie den Rollator überwiegend nutzen?

2. Überwiegend als Rollator?

- Schieben und Laufen in der Wohnung.  
Messen Sie die Stützhöhe (B)
- Abstand vom Boden bis zum Ende des Handballens messen:  
Aufreche Haltung, Arme locker hängen lassen.  
Wichtig ist eine leichte Beugung der Arme, wenn Sie sich auf den Pagen stützen.

Überwiegend zum Sitzen?

- Im Sitzen mit den Füßen durch die Wohnung trippeln.  
Messen Sie die Unterschenkellänge (C)
- Abstand vom Boden bis zum Beginn der Kniebeuge messen:  
Aufreche Haltung, Beine gestreckt.  
Wichtig ist, dass Ihre Fußsohlen den Boden berühren, wenn Sie auf dem Page sitzen.

3. Vergleichen Sie Ihre Messung mit der Beispiel-Tabelle auf Seite 4.



Super, Sie haben Ihre richtige Größe gefunden!

# Nutzung Page Wohnraumrollator zum Stützen



# Nutzung Page Wohnraumrollator zum Trippeln



# Größentabelle Page Wohnraumrollator

Untenstehend finden Sie eine Tabelle mit Werten an denen Sie sich bei der Messung orientieren können.

Wohnraumrollator Page	Jessica Größe S	Julia Größe M	Patrick Größe L
Körpergröße (A)	160cm	175cm	190cm
Boden bis Handballen (B)	76cm	87cm	94cm
Unterschenkellänge (C)	36cm	46cm	53cm
Griffhöhe Page	80cm	86cm	92cm
Sitzhöhe Page	52cm	55cm	58cm
Sitzhöhe Page mit Polstersitz	56cm	59cm	61cm

