

Extra

Sitz- und Rückenheizung

Die Extra Sitz- und Rückenheizung passt ideal zum Komfort-Bezug Extra. So genießen Sie Sitzen erster Klasse und angenehm wohlige Wärme dazu.



Extra Sitz- und Rückenheizung

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Extra Sitz- und Rückenheizung. Mit ihr können Sie auch an kalten Tagen einen Ausflug unternehmen und dabei wohlige Wärme im Rollstuhl genießen. Über mehrere Stunden. Dabei haben Sie die Fernbedienung immer zur Hand und können jederzeit drei Heizstufen einstellen. Der Akku wird direkt an der Steckdose aufgeladen. Die Sitz- und Rückenheizung können Sie über den Akku auch direkt ans Netz anschließen, wenn Sie sich es daheim gemütlich machen möchten. Auch das geht!

Das ist Sitzen erster Klasse in Perfektion. Und sicher ist es auch.

Immer nach einer Stunde schaltet sich die Heizung vorsorglich ab. Automatisch.

Auf diesen Seiten finden Sie Tipps und wichtige Hinweise. Bitte bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Und

sollten Sie Fragen haben: Ihr SALJOL Partner ist jederzeit für Sie da. Oder kontaktieren Sie uns direkt. Wir sind für Sie da.

Ihr Team von SALJOL



Hersteller	SALJOL GmbH
Produkt	Sitz- und Rückenheizung
Typ	Sitzmöbel und Rollstuhlzubehör
Artikelbezeichnung	EXTRA Sitz- und Rückenheizung
Baujahr	2016
Modell	HX69H

Identifikation

Hersteller

SALJOL GmbH
Hubertusstr. 8
82256 Fürstenfeldbruck
Tel.: +49 8141 317 74 0
Fax: +49 8141 317 74 11
hallo@saljol.de
www.saljol.de

Formales zur Gebrauchsanleitung

Version/Revision: 2017.1
Erstelldatum: 16.01.2017

Informationen entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Fotos können von der Realität abweichen.

© Copyright SALJOL 2017

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Firma SALJOL GmbH gestattet.


Lieferumfang

- 1 x Verteilerkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Ladegerät
- 1 x Akku
- 1 x Sitzheizkissen
- 1 x Rückenheizkissen

Montage Vorbereitung

Die Sitz- und Rückenpolster von Extra haben innen spezielle Taschen. In jede Tasche schieben Sie ein Heizkissen ein. Achten Sie darauf, die Heizkissen nicht zu knicken. Schieben Sie die Kissen mit dem Kabel nach oben ein! So wie auf der Skizze.


Der Bezug hat Aussparungen. Führen Sie die Kabel durch. Dann schließen Sie den Reißverschluss.

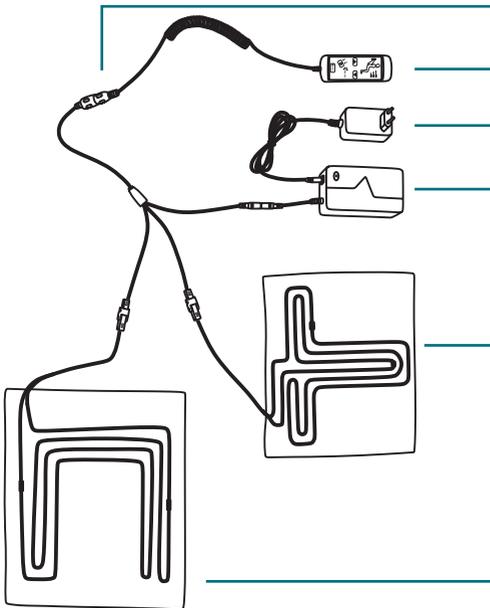


1


Rückenkissen

Sitzkissen

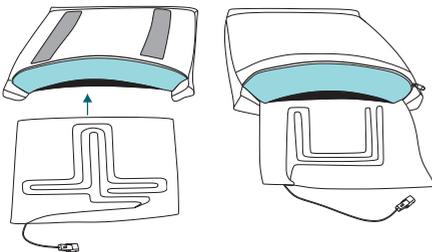


2

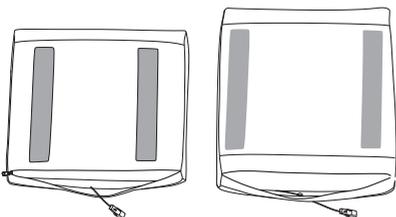

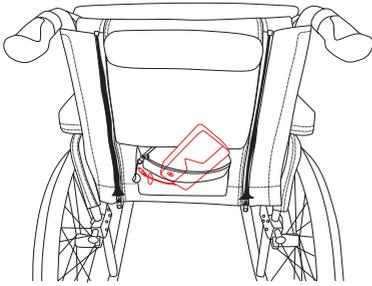


3

Die untere hintere Tasche ist für den Akku vorbereitet. Legen Sie den Akku also einfach hinein. Für das Kabel befindet sich ein Loch in der Rückwand der Tasche. Fädeln Sie das Kabel einfach hindurch.

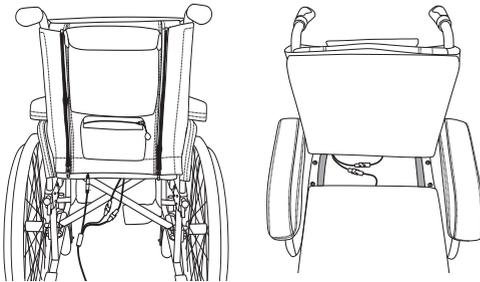

4

Jetzt nehmen Sie das Verteilerkabel. Schließen Sie zwei der Anschlusskabel des Verteilerkabels an die Kabel der Heizkissen an. Das dritte Kabel schließen Sie am Akku an. So wie in der Skizze zu sehen.

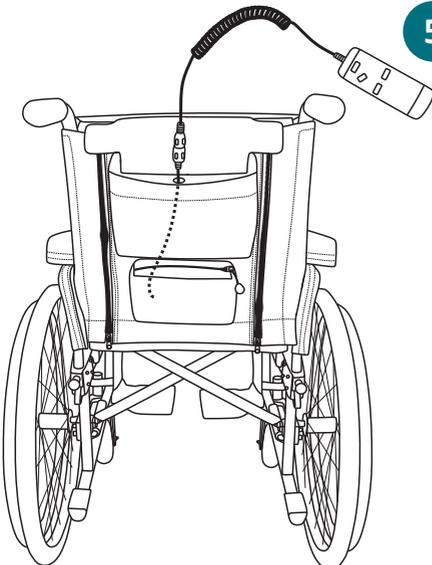


5

Verbinden Sie die Fernbedienung mit dem Verteilerkabel.

Inbetriebnahme

1

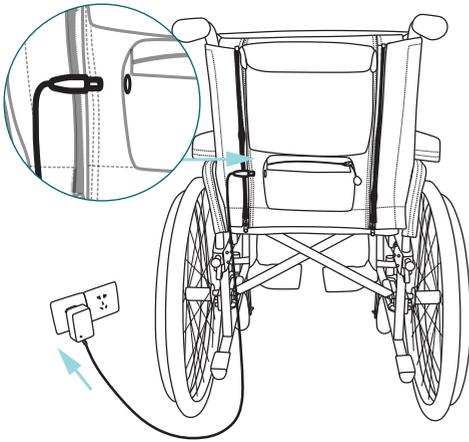


Am Anfang laden Sie den Akku vollständig auf! Benutzen Sie hierzu das Ladekabel. In der Akku-Tasche ist links ein seitliches Loch. Hier können Sie das Ladekabel direkt mit dem Akku verbinden. Dann stecken Sie das Netzteil einfach in die Steckdose.

Während des Ladens leuchtet ein rotes Licht am Akku. Ist der Akku vollständig geladen leuchtet es grün.




Bitte Geduld, beim ersten Laden des Akkus kann es mehr als vier Stunden dauern, bis das Licht grün wird.

2

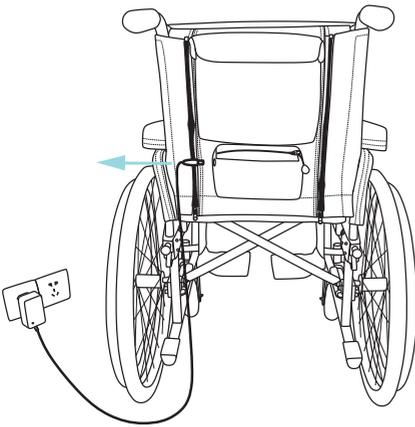


Leuchtet das Licht des Akkus grün, dürfen Sie das Ladekabel vom Akku trennen. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und dem Akku. Jetzt sind keine Kabel mehr im Weg und Sie können sich frei mit der Heizung bewegen.

3

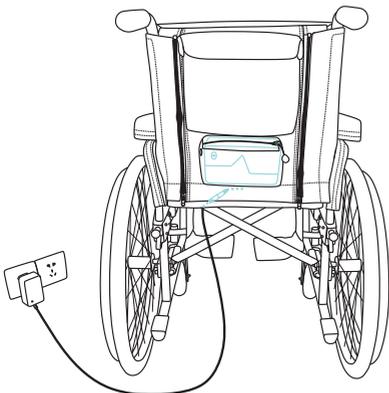

Auch der direkte Netzbetrieb ist möglich. Die Länge des Kabels beträgt einen Meter. Wir empfehlen aber, den Rollstuhl nicht zu bewegen, solange die Heizung direkt am Netz angeschlossen ist. Gehen Sie dazu genau wie beim Laden des Akkus vor und stecken das Ladekabel in den Akku. Die Heizung läuft nun automatisch für 60 Minuten.

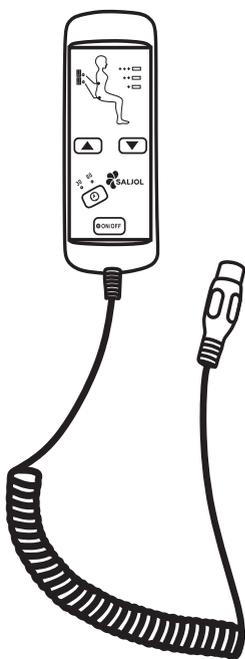

+++ Höchste (55°C ~ 65°C)
 ++ Mittlere (45°C ~ 55°C)
 + Unterste (35°C ~ 45°C)



Bedienung

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich mit den Funktionen und der Bedienung Ihrer Sitz- und Rückenheizung vertraut zu machen.

Die Knöpfe der Fernbedienung

Drücken Sie den An/Aus-Knopf, um die Heizkissen ein- und auszuschalten.

Drücken Sie den Schalter „ON“, erscheint ein grünes Licht.

Leuchtet der Balken grün, beginnen die beiden Heizkissen auf niedrigster Stufe zu heizen. Diese Stufe von 35-45°C ist voreingestellt, ebenso wie eine Heizdauer von 30 Minuten.

Wahl der Heizdauer

Sie können die Heizdauer wählen. Entweder 30 Minuten oder 60 Minuten. 30 Minuten sind voreingestellt: unter der 30 leuchtet ein grünes Licht. Wenn Sie 60 Minuten heizen wollen, drücken Sie den Knopf. Jetzt leuchtet das Licht unter der 60 grün. Zurück auf 30 Minuten? Einfach noch einmal den selben Knopf drücken.

Wahl der Heizstufen

Sie können zwischen drei Heizstufen wählen.

Drücken Sie die Pfeile, um zwischen den Heizstufen zu wechseln.

Die aktive Heizstufe leuchtet.

Der richtige Umgang mit dem Akku

Ihr Akku bietet Ihnen bis zu vier Stunden wohlige Wärme, so dass Sie auch längere Touren unternehmen können. Bitte behandeln Sie Ihren Akku schonend und beachten Sie die folgenden Hinweise.



Der Akku muss vor jedem Gebrauch aufgeladen werden. Er hat nicht von Anfang an seine volle Ladekapazität. Diese erreicht er erst nach mehrmaligem Laden. Bei der ersten Ladung des Akkus kann die Ladezeit deutlich über 4 Stunden dauern.

Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät!

Sicherheitshinweise



Bei Lagerung des Akkus dürfen 50° Celsius nicht überschritten werden, da der Akku ansonsten beschädigt wird.

- Um Feuergefahr und einem elektrischem Schlag vorzubeugen, laden Sie die Batterie nur mit dem mitgelieferten Ladegerät (12V/2A). Stecken Sie das Ladegerät in eine Standard-Wandsteckdose. Verwenden Sie es nicht in feuchter Umgebung. Rasiersteckdosen im Badezimmer sind ungeeignet.
- Das Ladegerät wird während des Ladevorgangs warm. Dies ist normal. Die Umgebungstemperatur beim Laden sollte zwischen 10° und 35° Celsius liegen.
- Laden Sie die Batterie monatlich auf, um sie vor Alterung und Entladung zu schützen.

- Halten Sie die Batterie von Feuer fern.
- Bitte waschen Sie die Heizkissen nicht.
- Bitte falten Sie die Heizkissen nicht.
- Bitte trocknen Sie ein nass gewordenes Heizkissen vor der Nutzung.
- Nicht geeignet für Babys, Kleinkinder und Menschen, die nicht empfindsam auf Wärme reagieren.
- Keine Nutzung der Heizung während des Ladevorgangs.
- Demontieren und entsorgen Sie keine Teile der Heizung.
- Beim Laden und beim Betrieb über die Steckdose: Bitte achten Sie darauf, dass niemand über das Kabel stolpern kann.
- Zum Schutz der Batterie und um einen Kurzschluss zu vermeiden. Stecken Sie niemals den Stecker der Batterie in das Steckerloch der Batterie. (Abb. 1)

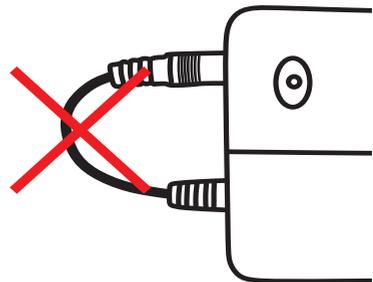


Abb.1

Technische Daten

- Drei Heizstufen wählbar
 - Unterste Heizstufe (35°C ~ 45°C), grünes Licht leuchtet
 - Mittlere Heizstufe (45°C ~ 55°C), blaues Licht leuchtet
 - Höchste Heizstufe (55°C ~ 65°C), rotes Licht leuchtet
- Fernbedienung über Druckknöpfe zu betätigen
- Heizdauer bis zu 4 Stunden
- Heizzeit regelbar nach 30- oder 60-Minuten-Zyklen
- Akkumaß 82 x 14 x 46.5 mm
- Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku 12V/6000mAh/72Wh
- IC Protection / PCB mit Kurzschluss-, Überladungs- und Tiefentladungsschutz
- Hochwertige Zellen mit langer Lebensdauer und hoher Zyklenfestigkeit
- Ladegerät 100-240V, 50/60Hz
- Ladezeit t~ 4 Stunden
- Ladegerät mit Leistungsaufnahme 220V
- Ladegerät mit Leistungsabgabe 12V/2A
- Batterie mit Leistungsaufnahme 12V/2A
- Batterie mit Leistungsabgabe 12V/4A
- Bemessungsaufnahme 25W

Fehlersuche und Störungsmeldungen

Wenn etwas nicht stimmt, unternehmen Sie am besten Folgendes:

- Verständigen Sie Ihren Fachhändler.
- Wenn notwendig, nehmen Sie direkt Kontakt mit SALJOL auf.

Liste der Warn- und Störmeldungen

Störung: Heizung ohne Funktion

Ursache und Abhilfe:

1. *Sitzen alle Kabelverbindungen?*
Stecken Sie die Stecker aus und wieder ein
2. *Ist die Zeitschaltuhr nach 30 oder 60 Minuten abgelaufen?*
Drücken Sie den „ON“ Schalter um die Heizung wieder anzuschalten.
3. *Ist die Batterie geladen?*
Laden Sie die Batterie 4 Stunden lang auf.
4. *Ist Ihre Steckdose zum Laden des Akkus defekt?*
Überprüfung der Steckdose mit einem anderen Gerät.
Zum Beispiel können Sie prüfen, ob Ihr Handyakku lädt.
5. *Elektrische Sicherung.*
Überprüfen Sie die entsprechende Sicherung.
6. *Allgemeiner Stromausfall?*
Überprüfen Sie die Funktion anderer elektrischer Geräte in Ihrem Haushalt. Schalten Sie z.B. in mehreren Zimmern das Licht ein. Verständigen Sie ggf. den für Sie zuständigen Hausmeister oder Gebäudedienst.
7. *Sind alle Teile der Heizung unversehrt?*

Bitte versuchen Sie nicht die Heizung eigenständig zu reparieren. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

Entsorgung

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen Behältnissen des Handels.

Gewährleistung

Gewährleistungsbestimmungen

Alle Mängel der Extra Sitz- und Rückenheizung unterliegen der Gewährleistung, sofern diese Mängel nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.



Wichtig! Informieren Sie bei Beanstandungen unverzüglich Ihren Fachhändler! Die Seriennummer befindet sich auf dem Produkt oder der Umverpackung. Dort ist sie aufgeklebt.

1. Die Gewährleistung ist nicht übertragbar.
2. Alle Arbeiten und Reparaturen dürfen nur durchgeführt werden von:
Fachpersonal Ihres Fachhändlers, Elektro-Techniker. Ansonsten erlischt die Gewährleistung.
3. Ist Ihre Reklamation berechtigt, erhalten Sie die Ersatzteile für Ihre Reparaturen kostenlos in einem Zeitraum von 6

Monaten ab Auslieferung. Lieferant ist Ihr Fachhändler.

4. Die Gewährleistung für Sitz- und Rückenheizung oder einzelne Teile erlischt wenn:
- jemand die Sitz- und Rückenheizung anders wartet und pflegt, als von uns vorgegeben
 - wenn Teile an der Sitz- und Rückenheizung montiert werden, bei denen es sich nicht um Originalteile handelt oder um solche, die nicht vom Hersteller freigegeben wurden
 - jemand die Sitz- und Rückenheizung unsachgemäß verwendet oder willentlich beschädigt
 - nicht autorisierte Personen Reparaturen durchführen.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen

Die Gewährleistung und jegliche allgemeine Produkthaftung erlischt wenn:

- Die oben aufgeführten Sicherheitshinweise nicht befolgt werden
- die Bedienungsanleitung nicht befolgt wird
- Reparaturen und Wartungen unsachgemäß vorgenommen werden
- Technische Änderungen und Ergänzungen an der Sitz- und Rückenheizung vorgenommen werden
- Schäden, die durch Missbrauch, Überbelastung oder Überbeanspruchung entstehen
- Schäden, die durch Flüssigkeiten entstehen
- Schäden oder Beschädigungen durch Zigaretten oder offenes Feuer.

Weiteres Zubehör für EXTRA.

Machen Sie noch mehr aus Ihrem Extra.



Extra Gamasche

Extra Gamasche

Der ideale Schutz für die Unterschenkel.
Für alle, die mit Ihrem Rollstuhl trippeln.



Extra Inkontinenz-Auflage

Extra Inkontinenz-Auflage

Zwei Aufnahme-Pads. Im Austausch mit einer Hand zu entfernen. Bei 60° waschbar. Das Set wird über die Ecken des Extra Sitzkissen gespannt. Die Aufnahmekapazität beträgt ca. 500 ml Flüssigkeit.

Stand 01.2017, Produkte ähnl. Abbildungen. Techn. Änderungen vorbehalten.