

Saljol

Allround Rollator

Gebruikershandleiding



www.saljol.de/en



Gebruikershandleiding

Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van een Saljol allround rollator! Met uw nieuwe rollator zult u in staat zijn om een mobiel en zelfstandig leven in stijl te leiden. De allround rollator van aluminium is ontwikkeld met veel aandacht voor veiligheid en zal u ondersteunen in uw dagelijks leven.

Lees de gebruikershandleiding grondig door voordat u uw allround rollator voor de eerste keer gebruikt. De handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie, nuttige tips voor gebruik en verzorging en een lijst van aanbevolen accessoires.



Inhoud

1.	Identificatie.....	4
2.	Algemene opmerkingen.....	5
3.	Opmerkingen.....	6
3.1	Veiligheidsinstructies.....	6
3.2	Instructies voor het veilige gebruik van het product.....	6
4.	Inhoud van de verpakking & algemene productomschrijving.....	7
4.1	Inhoud van de verpakking.....	7
4.2	Markering/label.....	8
4.3	Productoverzicht.....	9
5.	Bediening.....	10
5.1	Uitklappen van de rollator.....	10
5.2	Inklappen van de rollator.....	11
5.3	Instelling van de juiste hoogte van de handgreep/steunhoogte.....	11
5.4	Gebruik van de handrem.....	12
5.5	Gebruik van de parkeerrem.....	12
5.6	Rem aanpassen.....	13
5.7	Ombouw naar eenhandige rem.....	14
5.8	Gebruik de drempelhulp.....	17
6.	Onderhoud.....	18
6.1	Schoonmaken.....	18
6.2	Desinfectie.....	18
6.3	Inspectie.....	19
7.	Transportomschrijving.....	19
8.	Opslag en verzending.....	19
9.	Verwijdering.....	19
10.	Technische gegevens.....	20
11.	Garantie.....	21
12.	Opmerking over de verplichting om incidenten te melden.....	22
13.	Accessoires.....	22
14.	Testprotocol voor hergebruik.....	24

1. Identificatie

Fabrikant: Saljol GmbH
Product: Allround Rollator
Type: Premium rollator voor buiten, allround lichtgewicht rollator
Artikelnaam: Allround Rollator
Version: 2022

Fabrikant: Saljol GmbH
Frauenstraße 32
82216 Maisach
Telefoon: +49 (0)8141 317740
Fax: +49 (0)8141 3177411
Mail: hallo@saljol.de
Web: www.saljol.de/en

Formele informatie in de gebruiksaanwijzing:

Versie/revisie: 2022.10

Oprichtingsdatum: 10.10.2022

De informatie komt overeen met de status op het moment van drukken.

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.

Technische tekeningen en foto's kunnen afwijken van de werkelijkheid.

©2022 Saljol GmbH: alle rechten voorbehouden.

Herdruk, ook in uittreksels, alleen met toestemming van de onderneming Saljol GmbH.

Saljol Allround Rollator AR62, Pearl Grey	4058789014271
Saljol Allround Rollator AR62, Magic Black	4058789014042
Saljol Allround Rollator AR54, Pearl Grey	4058789014059
Saljol Allround Rollator AR54, Magic Black	4058789014066

2. Algemene opmerkingen

Doel

De allround rollator van Saljol is ontwikkeld voor gebruik binnen- en vooral buitenshuis. De rollator dient als een loophulpmiddel met vier wielen, voor mensen met mobiliteitsproblemen, bijvoorbeeld voor het zelfstandig staan, lopen en zitten.

Indicatie

De Saljol allround rollator is ontworpen om te helpen bij veel verschillende gezondheidsproblemen. Vooral voor mensen die extra stabiliteit nodig hebben tijdens het lopen, is deze rollator ontworpen. De geïntegreerde netten zitting zorgt ervoor dat u onderweg even kunt zitten. Dagelijkse bezigheden kunnen, zonder hulp van een derde partij, nu worden gedaan met de Saljol allround rollator.

Niet geschikt voor

De Saljol allround rollator is niet geschikt voor mensen met een zwakke armkracht, ernstige cognitieve stoornissen of een slecht evenwicht. Het gebruik en de mogelijke toepassingen van de Saljol allround rollator moeten voor gebruik worden geëvalueerd en geïnstrueerd door een arts of therapeut.

Levensduur

Bij correct gebruik, regelmatig onderhoud door een gespecialiseerd bedrijf en naleving van de veiligheidsvoorschriften, is de verwachte levensduur van de allround rollator maximaal 7 jaar.

Als de rollator na 7 jaar nog steeds in goede staat is, kunt u deze blijven gebruiken.

Verantwoordelijkheid

Als fabrikant kunnen wij ons alleen verantwoordelijk achten voor de veiligheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de rollator indien veranderingen, uitbreidingen, reparaties en onderhoudswerkzaamheden regelmatig en uitsluitend door geautoriseerde vakmensen worden uitgevoerd en indien de rollator op de juiste manier en in overeenstemming met alle gebruiksinstructies wordt gebruikt.

CE-conformiteitsverklaring



Saljol GmbH, als fabrikant van het product, verklaart dat de allround rollator voldoet aan de eisen van de verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement, ISO 11199-2:2005 - Loophulpmiddelen die met beide armen worden bediend - Eisen en beproevingsmethoden. De zitting en handvatten voldoen aan de biologische evaluatie volgens ISO 10993-5: 2009-10.

3. Opmerkingen

3.1 Veiligheidsinstructies

De veiligheidsinstructies zijn twee keer gemarkeerd: door een symbool en een signaalwoord. Het symbool informeert u over het type bericht. Het signaalwoord verklaart details, bijvoorbeeld de ernst van een dreigend risico.



Waarschuwing/Belangrijk

Mogelijk gevaarlijke situatie (lichte verwondingen of materiële schade), Instructies en situatie-omschrijvingen voor het veilig gebruik van de rollator



Tips

Tips voor het gebruik en nuttige informatie

3.2 Instructies voor het veilige gebruik van het product

Voor veilig gebruik van het product, houd het volgende in gedachten:



Gebruiksbeperkingen

- Het maximaal gebruikersgewicht is 150 kg.
- De nettas mag met maximaal 5 kg worden geladen.
- De rollator is niet geschikt om uzelf voort te bewegen terwijl u zit: deze is niet ontworpen voor een gebruik als trippelstoel.
- De rollator is ontworpen voor zowel binnen- als buitenshuis gebruik.
- Nooit gebruiken in nabijheid van ontvlambare/brandbare/brandende stoffen.



Ongevallenpreventie

- Gebruik de rollator alleen voor het omschreven doel.
- Gebruik de rollator alleen wanneer deze in perfecte technische staat is.
- Het is verboden om constructieve wijzigingen aan de rollator aan te brengen, behalve wanneer u een schriftelijke verklaring van toestemming van de fabrikant Saljol heeft.
- Let er bij het afstellen van de rollator op dat u niet met uw vingers of andere lichaamsdelen tussen de bewegende delen komt.
- Zorg ervoor dat beide parkeerremmen geactiveerd zijn wanneer u op het zitje plaatsneemt.
- Alle vier de wielen moeten te allen tijde in contact zijn met de grond. Dit zorgt ervoor dat de rollator in balans is, wat ongelukken voorkomt.
- Wees voorzichtig bij het lopen op ijzige en gladde grond en over kleine obstakels zoals takken. Loop voorzichtig zodat u snel kunt reageren.
- Gebruik altijd beide parkeerremmen wanneer u stilstaat met de Saljol allround rollator of indien u deze parkeert.



Waarschuwing

Vingers of andere lichaamsdelen van de gebruiker en/of een derde kunnen bij het inklappen van de rollator of het verstellen van de steunhoogte klem komen te zitten. Wees daarom uiterst oplettend en voorzichtig bij het verstellen van de rollator om te voorkomen dat vingers of andere lichaamsdelen klem komen te zitten.

4. Inhoud van de verpakking & algemene productomschrijving

4.1 Inhoud van de verpakking

- 1x Saljol allround rollator
- 1x nettasje
- 1x lange Bowdenkabel voor ombouw naar eenhandige rem incl. dubbele clip
- 1x stokhouder (gemonteerd)
- 1x gebruikershandleiding

4.2 Markering/label

Het productlabel bevindt zich aan de binnenkant van het linkerframedeel. Het bevat belangrijke informatie over het product: EAN code, productnaam, productiedatum, productkleur en gewicht, maximum gebruikersgewicht, maximum draaggewicht tas, zithoogte, informatie over Saljol en het serienummer. Het label mag niet worden verwijderd.

De volgende symbolen zijn, deels in combinatie met verdere informatie, te vinden op de markering van de allround rollator en op de verpakking om belangrijke eigenschappen te identificeren.

- REF

Bestelnummer/artikelnnummer
- Productiedatum
- Kleur en totale gewicht
- L/W/H
in cm

Lengte/breedte/hoogte van de rollator in cm
- Maximum gebruikersgewicht
- Maximum draaggewicht van de nettas
- cm

Zithoogte
- MD

Medisch hulpmiddel
- CE-markering
- Product geschikt voor binnen- en buitenshuis
- Fabrikant van het product
- SN

Serienummer

REF	EAN	Aluminium Rollator
		2021-01-01
		Pearl Grey
		6,6 kg
	L/W/H in cm	69/61/81-103
		150 kg
		5 kg
		62 cm
		SALJOL GmbH Frauenstraße 32 82216 Maisach Germany
SN		
		1234567890123456

4.3 Productoverzicht



Figuur 1: de Saljol allround rollator

5. Bediening

Inventarisatie

Neem de allround rollator van Saljol uit de doos en controleer of er iets ontbreekt. Vergelijk met de figuur 1 op pagina 9 en met de inhoud van de verpakking, zoals omschreven in 4.1 op pagina 7. Als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer of Saljol.

5.1 Uitklappen van de rollator



Klik de bruine haak omhoog om het klapmechanisme te ontgrendelen.



Houd beide handgrepen vast en duw of trek ze tegelijkertijd uit elkaar.



Duw beide zittingbuizen naar beneden totdat u een „klik“-geluid hoort.



Belangrijk

Test nu of u de zittingbuizen uit elkaar kunt trekken. Als dit niet lukt, is de rollator correct en veilig uitgeklapd. In geval van twijfel, vergelijkt u de situatie met figuur 1 op pagina 9. Controleer na het uitklappen van de rollator of de zitting goed vastzit door het ontgrendelingsmechanisme hoorbaar in te schakelen. Het oppervlak van de zitting is dan goed gespannen. Zorg ervoor dat beide duwstangen stevig in het frame zijn geplaatst en met de stelschroef stevig zijn bevestigd. Test altijd of alle accessoires stevig vastzitten VOORDAT u ze gebruikt. Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot letsel.

5.2 Inklappen van de rollator



Trek aan de bruine ontgrendelingslus van het zitje om de rollator in te klappen.



Druk de rollator samen bij de handvatten totdat beide zittingbuizen dicht bij elkaar zijn.



Houd de rollator ingeklapt met de bruine haak.

5.3 Instelling van de juiste hoogte van de handgreep/steunhoogte



Draai de stelschroeven bij de duwstangen los. Aan de binnenzijde van de duwstangen vindt u een hoogteschaal die het gemakkelijker maakt om het linker- en rechterstuur op dezelfde hoogte in te stellen.



U kunt de juiste greephoogte vinden door in de rollator te gaan staan, uw armen losjes te laten hangen en ze licht te buigen. De hoogte van de bal van de duim komt nu overeen met de juiste hoogte van de duwstangen.



Draai beide stelschroeven handvast aan. Tip: Activeer de parkeerrem, zodat de rollator niet wegrolt wanneer u hem afstelt.



Belangrijk

Stel beide duwstangen in op dezelfde hoogte om een symmetrische houding tijdens het lopen te bereiken. Gebruik altijd de parkeerrem (zie 5.5) wanneer u wilt stoppen, op de rollator wilt zitten of deze ergens achter wilt laten.

5.4 Gebruik van de handrem



Om met de rollator af te remmen, knijpt u eenvoudigweg de remgrepen omhoog in de richting van de handvatten. Om veilig in de rollator stil te staan, houdt u beide remgrepen ingeknepen.

Om verder te lopen, hoeft u alleen maar de remgrepen los te laten.

5.5 Gebruik van de parkeerrem



Om de parkeerrem in te schakelen, drukt u de remgrepen naar beneden totdat u een „klik“ hoort.

Om de rollator van de parkeerrem te halen, trekt u de remgrepen naar boven.



Belangrijk

- Gebruik de remmen wanneer u de rollator niet voortbeweegt.
- Gebruik de parkeerrem bij het parkeren van de rollator of wanneer u erop wilt zitten.
- Het wordt aanbevolen de remmen te gebruiken op hellende ondergronden om een veiliger gevoel te krijgen en het risico op vallen te verminderen.
- Ga op het zitje met uw rug naar de tas zitten en niet op de tas.
- Ga rechtop zitten op de zitting terwijl uw onderarmen comfortabel op de armsteunen zijn geplaatst.

5.6 Rem aanpassen

Als de remkracht afneemt door slijtage van de wielen, moet de rem worden bijgesteld. De rem moet zodanig worden afgesteld dat beide wielen gelijkmatig remmen. De afstand tussen het remblokje en het wieloppervlak moet ca. 2-3,5 mm bedragen.



Draai de borgmoer los met een steeksleutel maat 8 en draai hem helemaal naar boven. Draai tegelijkertijd de instelschroef vast.



Stel de remkracht af door de instelschroef naar binnen of naar buiten te draaien. Controleer de werking van de remmen door de wielen te draaien en de remgrepen te bedienen. De wielen moeten vrij kunnen draaien, maar onmiddellijk stoppen wanneer geremd wordt. Het mag niet mogelijk zijn de wielen te bewegen wanneer de rem vergrendeld is. Draai de borgmoer weer goed vast.



Let op

De rem is correct afgesteld indien, wanneer er wordt geremd, de achterwielen blokkeren en niet draaien wanneer de rollator wordt geduwd.



Info


Hier vindt u een video met uitleg over het afstellen van de remmen: <https://www.youtube.com/watch?v=-k-Ru8oiwFM> of scan de QR-code.




5.7 Ombouw naar eenhandige rem

Om het remsysteem zelf om te bouwen naar een eenhandige rem, moet u eerst nagaan of u de linker- of de rechterhandrem nodig hebt. Maak vervolgens de langere Bowdenkabel en de bijgeleverde dubbele klem gereed. Voor de ombouw heeft u twee steeksleutels maat 8, een tang en een afbuighulp, bijv. een spijker, nodig. Voor een beter begrip van de ombouw hebben wij een video voor u gemaakt. U kunt hem vinden op: <https://www.youtube.com/watch?v=MGKBGVUJyml> of scan de QR-code.

Uw medische specialzaak zal u zeker graag helpen bij de ombouw naar een eenhandige rem of u kunt contact opnemen met de klantendienst van Saljol: kundenservice@saljol.de

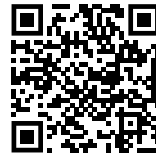

Verklaring van de termen

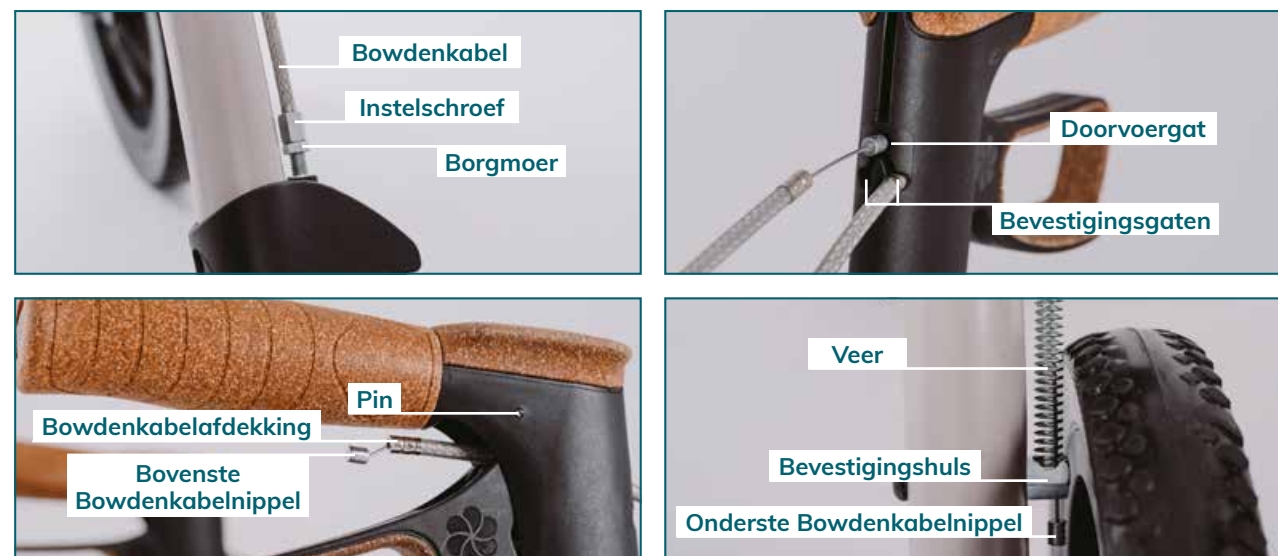

Demontage van de standaard Bowdenkabel


De standaard Bowdenkabel moet worden gedemonteerd aan de kant waar u de remhendel niet nodig heeft.



Draai de borgmoer los met een steeksleutel maat 8 en draai hem volledig naar boven. Draai tegelijkertijd de instelschroef vast.



Draai de instelschroef samen met de borgmoer volledig naar beneden.

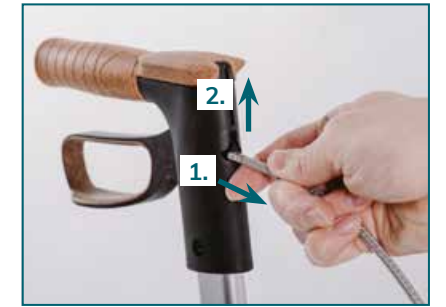

Trek de Bowdenkabel bij het handvat uit het bevestigingsgat (1.) tot een dunne draad zichtbaar wordt en leid deze naar boven (2.).



Duw de Bowdenkabel in het gat totdat het uiteinde van de Bowdenkabel en de Bowdenkabelnippel aan de binnenzijde van de handgreep uitsteken.



Nu kunt u de Bowdenkabel uit het doorvoergat naar voren trekken.



Duw de bovenste Bowdenkabelnippel in de Bowdenkabelafdekking



Maak de onderste Bowdenkabelnippel los uit de bevestigingshuls. Trek de veer naar beneden.



Draai de instelschroef volledig los, inclusief de borgmoer (naar boven).



Nu kunt u de Bowdenkabel uit het remblok verwijderen. De gedemonteerde Bowdenkabel kan nu opzijgelegd worden.

Montage van de langere Bowdenkabel



Steek het uiteinde met de instelschroef van de lange Bowdenkabel van bovenaf in het vrije remblok. Draai de borgmoer helemaal naar boven, de instelschroef moet volledig ingedraaid worden.



Duw de veer van onderaf over de Bowdenkabel. Haak de onderste Bowdenkabelnippel vanaf de bandzijde in de bevestigingshuls.



Trek de bovenste Bowdenkabelnippel naar boven totdat de onderste Bowdenkabelnippel de bevestigingshuls raakt.



Leg de Bowdenkabel tussen het kruismechanisme en het nettasje en leid hem naar de rem.



Duw de Bowdenkabel aan de bovenkant door het bovenste doorvoergat.



Bevestig de bovenste Bowdenkabelnippel in de houder (naast de andere nippel) op de remhendel en trek tegelijkertijd de Bowdenkabelafdekking naar voren uit het doorvoergat.



Hang de Bowdenkabelafdekking in het vrije bevestigingsgat.



Bevestig de bestaande en de lange Bowdenkabel aan elkaar met de bijgeleverde dubbele klem.



Draai de instelschroef los totdat de afstand tussen het remblok en de band ca. 2-3,5 mm bedraagt.



Schroef de borgmoer weer vast. Let op: De rem moet zo ingesteld worden dat de rollator aan beide kanten evenveel remt.



Draai de borgmoer met de steeksleutel zo vast dat de remkracht niet meer kan veranderen.



Voorzichtig: Controleer nu zorgvuldig of beide remmen gelijkmatig remmen wanneer de remhendel wordt bediend.

Verwijderen van de remhendel bij gebruik van de eenhandige rem



Als u de Bowdenkabel hebt verwijderd, kunt u ook de overbodige remhendel demonteren. Sla hiervoor de pin op de remhendel uit met een dun voorwerp, bijvoorbeeld een spijker, en trek deze er met de hand of een tang naar beneden uit. De remhendel is nu los en kan worden verwijderd. Bewaar de losse pen samen met de losse remhendel en de Bowdenkabel op een veilige plaats.

5.8 Gebruik de drempelhulp



De drempelhulp zit naast de achterwielen. Zet één voet op de drempelhulp en kantel de rollator schuin naar u toe met behulp van de handgrepen. De voorwielen zijn nu in de lucht. Op de achterwielen rijdt u zo een drempel over of een stoeprand op.

6. Onderhoud

6.1 Schoonmaken

Frame

Schoonmaken kan met warm water en een spons. In geval van hardnekkig vuil, kan een commercieel schoonmaakmiddel aan het water worden toegevoegd. Ontsmettingsmiddelen kunnen zonder problemen worden gebruikt. Kunststof onderdelen worden het best gereinigd met een in de handel verkrijgbare kunststofreiniger. Volg de gebruiksaanwijzing van het gebruikte reinigingsmiddel. Om het piepen of kraken van de dwarsbeugel te stoppen, kunnen eenvoudige middelen zoals teflonspray worden gebruikt.



Belangrijk

Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals oplosmiddelen/schuurmiddelen of harde borstels.

Wielen

Reinig de wielen met warm water en een mild oplosmiddel. Indien nodig, gebruik een plastic borstel, nooit een staalborstel. Om het piepen of kraken van de wielen, of van de voorvork te stoppen, kunnen eenvoudige middelen zoals Teflonspray worden gebruikt.



Belangrijk

Maak de rollator nooit schoon met een hogedruk-/stoomreiniger!

6.2 Desinfectie

De allround rollator kan worden gedesinfecteerd met standaard huishoudelijke desinfectiemiddelen. De Robert Koch lijst van goedgekeurde desinfectiemiddelen is te vinden op <http://www.rki.de/en>. Laat de rollator aan de lucht drogen en let op de inwerktijd van het desinfectiemiddel dat u gebruikt.

6.3 Inspectie

Wij adviseren de allround rollator minimaal één keer per jaar, idealiter zelfs twee keer, door de dealer/Saljol te laten inspecteren. Indien er fouten of defecten ontstaan tijdens het gebruik, moet de allround rollator onmiddellijk naar de dealer/Saljol worden teruggebracht voor reparatie. Saljol behoudt zich het recht voor om de aanspraak op garantie te beperken indien de rollator niet regelmatig is onderhouden.

7. Transportomschrijving

De rollator is gemakkelijk in te klappen en dus handig op te bergen voor transport. Als het nodig is om het te vervoeren, bijvoorbeeld in de auto, volg dan de instructies voor het inklappen. Zorg ervoor dat u de rollator op een veilige manier opbergt, zodat deze beschermd is tegen plotselinge en gevaarlijke bewegingen (bijv. remmen bij autorijden). De Saljol reistas als accessoire beschermt uw rollator tegen externe invloeden en beschadigingen tijdens het transport.

8. Opslag en verzending

Bewaar de rollator rechtop, op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen of derden wanneer deze niet gebruikt wordt. Als de rollator moet worden opgeslagen of verzonden, is het raadzaam om de originele verpakking te bewaren en deze voor deze doeleinden op te bergen, zodat deze beschikbaar is wanneer nodig. Dan is uw rollator optimaal beschermd tegen omgevingsinvloeden tijdens opslag of transport.

9. Verwijdering

Deponeer materialen gescheiden naar soort in de daarvoor bestemde inzamel-systemen. Gelieve gevaarlijk afval te deponeren in de daartoe voorziene inzamelsystemen.

10. Technische gegevens

Allround rollator	AR62
Max. gewicht gebruiker	150 kg
Totaalgewicht rollator zonder nettasje	6,4 kg
Nettasje	0,2 kg
Max. draaggewicht nettasje	5 kg
Lengte	67 cm
Breedte (ingeklapt)	61 cm
Breedte (uitgeklapt)	21 cm
Zitbreedte (tussen de duwstangen)	46 cm
Minimale hoogte (duwstang op de laagste stand)	81 cm
Hoogte van de verstelbare duwhandgrepen	81–103 cm
Zithoogte	62 cm
Remmen	2x handrem met parkeerfunctie, om te bouwen tot eenhandige rem
Voorwielen (diameter x breedte)	250 x 32 mm – zwarte, zachte polyurethaan wielen met stevige kern
Achterwielen (diameter x breedte)	200 x 32 mm – zwarte, zachte polyurethaan wielen met stevige kern
Draaicirkel	118 cm
Reflectoren	33 stuks

11. Garantie

Indien het aangeschafte product gebreken vertoont, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. Voor zover u de goederen bij een speciaalzaak heeft gekocht, neem dan onmiddellijk contact op met uw verkoper; indien u de goederen rechtstreeks bij Saljol heeft gekocht, neem dan a.u.b. rechtstreeks contact op met Saljol, Tel. +49 (0)8141 317740. Zichtbare gebreken moeten schriftelijk worden gemeld binnen tien dagen na levering, verbor-gen gebreken binnen tien dagen na ontdekking. Bovengenoemde termijnen zijn fatale termijnen. Saljol is gerechtigd te beslissen of een eventueel gebrek door herstel of door nalevering moet worden verholpen („latere prestatie“). Voor het overige gelden de be-palingen van de Algemene Voorwaarden en voorwaarden van Saljol, beschikbaar op <https://www.saljol.de/en/data-protection/>, van toepassing. Saljol geeft 2 jaar garantie op productie- of materiaalfouten.

Omvang van de garantie

Wij garanderen dat het product vrij is van materiaal-, fabricage- en werking binnen de garantieperiode. Indien een defect optreedt tijdens de garantieperiode zullen wij het product naar eigen goeddunken gratis repareren of indien nodig vervangen door een nieuw exemplaar. Uitgesloten van de garantie zijn onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, handgrepen, zitnet, remmechanisme en banden. Deze garantiebepalingen gelden alleen voor in Duitsland gekochte producten, voor zover ze rechtstreeks bij Saljol of bij een geautoriseerde vakhandelaar werden gekocht. De verkoper zal u informeren over de garantievoorwaarden voor producten die in het buitenland zijn aangeschaft. Garantiewerkzaamheden en vervangende leveringen omwille van de garantie leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn.

Uitsluiting van garantie

Het recht op garantie vervalt indien de rollator ondeugdelijk is onderhouden of gerepareerd door een ongeschoold persoon of als het product is gebruikt met niet originele accessoires. Onjuiste installatie als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, gebruik in strijd met het omschreven doel of ondeskundig gebruik of onderhoud van het product leiden tot verlies van garantie, evenals externe invloeden (bijv. transportschade, schade door stoten en slagen, weersinvloeden).

12. Opmerking over de verplichting om incidenten te melden

Alle ernstige incidenten in verband met het product moeten aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit worden gemeld. Ernstige incidenten in de zin van de wet zijn alle ongewenste voorvallen die een van de volgende gevolgen hebben: dood, levensbedreigend letsel, blijvende lichamelijke schade en chronische ziekte.

In de Bondsrepubliek Duitsland, gelieve te informeren:

- uw plaatselijke distributeur, Saljol-verkooppartner of Saljol GmbH, Frauenstr. 32, D-82216 Maisach; www.saljol.de
- het Federaal Instituut voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (BfArM), Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn; www.bfarm.de

In lidstaten van de EU, gelieve te informeren:


- uw plaatselijke distributeur, SALJOL verkooppartner of Saljol GmbH, Frauenstr. 32, D-82216 Maisach; www.saljol.de
- de autoriteit die verantwoordelijk is voor incidenten met medische hulpmiddelen in uw land

13. Accessoires



Rugsteun

Dankzij de rugsteun kunt u comfortabel op de rollator zitten en ertegen leunen. Deze is verstelbaar en daardoor ook geschikt voor lange mensen. De rugsteun biedt u meer comfort bij het zitten op de rollator. Door de grote uitsparing wordt uw zicht op de weg niet belemmerd wanneer u loopt. Een reflecterende voering biedt meer veiligheid.

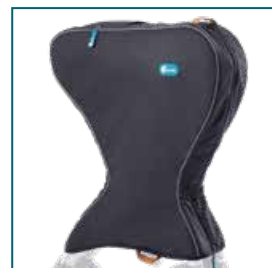

Reistas

Bescherm uw rollator tegen invloeden van buitenaf en beschadigingen wanneer u hem opbergt. De gevoerde tas kan gemakkelijk van achteren over de rollator worden geplaatst. Dankzij rits-sluitingen ter hoogte van de handgrepen van de rollator kunt u de rollator veilig rondrijden, zelfs wanneer deze is ingeklapt.



Design tas van JOST

De moderne design tas voor uw rollator in luipaardprint of zwart is stabiel en waterafstotend. Hij kan ook als hand- of schouder-tas worden gebruikt en kan met 5 kg worden belast.



Houten dienblad

De tafel dekken wordt een fluitje van een cent. Het hoogwaardige houten dienblad voor de rollator maakt het gemakkelijk om spullen van A naar B te vervoeren.



Stevige zitting

De stevige zitting verbetert uw houvast wanneer u op de rollator zit. U zit rechtop en veilig – overal.



Parasol/paraplu

Gaat u op stap met regenachtig weer? Met de paraplu op de rollator blijft u droog en kunt u veilig met beide handen duwen. Gebruikt als parasol zorgt hij voor schaduw. Gemakkelijk in elkaar te zetten!



LED lamp

Met de heldere LED lamp op uw rollator bent u goed zichtbaar in het donker. Ook geschikt voor het verlichten van de loopruimte – zodat u kleine obstakels kunt zien.



Bel

Met de bel op uw rollator kunt u de aandacht op u vestigen in het verkeer. U hoeft hem alleen maar vast te schroeven en te bellen, net als op een fiets.



Tas

De tas, verkrijgbaar in zwarte gewezen stof of in een combinatie van zwarte gewezen stof en bruin imitatieleer, is belastbaar met 5 kg, kan met één hand van de rollator worden gehaald en heeft een praktische magneetsluiting.





Extra wandelstokhouder

De wandelstokhouder houdt uw loophulpmiddel stevig vast aan de rollator. Hij kan rechts en links van het frame en de hoogteverstelling van de rollator worden bevestigd. Eén wandelstokhouder is al voorgemonteerd op de allround rollator.



Opmerking

U kunt de accessoires bestellen in onze online winkel www.saljol.de/en 24-7 of telefonisch via onze klantenservice (ma.-vr. 9.00–16.00 uur) op het nummer +49 (0)8141 317740 vanuit huis. Of neem contact op met de dealer waar u de allround rollator heeft aangeschaft. De accessoires kunnen per land verschillen.

14. Testprotocol voor hergebruik

Testprotocol voor hergebruik door een gekwalificeerde specialist.

Vraag	Ja	Nee
Zijn alle etiketten op het product geplakt?		
Zijn er losse of loszittende schroeven?		
Werken beide parkeerremmen?		
Zijn de parkeerremmen gemakkelijk te activeren?		
Is de rollator gemakkelijk in/uit te klappen?		
Datum	Controleur	Stempel/Handtekening

