

# So finden Sie die richtige Größe für Ihren Saljol Wohnraumrollator

Die passende Größe des Alltagshelfers für Ihr Zuhause hängt von der Situation ab, in der Sie den Rollator am häufigsten nutzen. **Wenn Sie den Wohnraumrollator eher im Sitzen nutzen, ist Ihre Unterschenkelänge ausschlaggebend. Nutzen Sie den Rollator vor allem, um damit zu gehen und sich darauf abzustützen, ist die Körpergröße relevant.** Im Folgenden finden Sie Tipps, wie Sie die passende Größe für Ihr neues Lieblingsgefährt ermitteln.

- Benötigen Sie den Rollator, um Kraft zu sparen und vieles im Sitzen zu erledigen? Dann finden Sie unter „**1. Überwiegend zum Sitzen**“ die richtige Größe.
- Wollen Sie den Rollator hauptsächlich wie einen Rollator, also Ersatz für einen Handlauf nutzen? Dann lesen Sie bei „**2. Überwiegend als Rollator**“, welche Größe die richtige ist.

**Hinweis:** Beachten Sie bitte bei Nutzung des Zubehörs Polstersitz, dass sich die Sitzhöhe um 1,5 cm erhöht. Dann steigt die Höhe des WR52 auf 53,5 cm, des WR55 auf 56,5 cm und des WR58 auf 59,5 cm.



# 1. Überwiegend zum Sitzen

Sie benötigen den Rollator, um sich im Sitzen mit den Füßen durch die Wohnung zu schieben (trippeln)? Dann benötigen Sie folgende Maße:

## Ihre Unterschenkelänge (A)

Messen Sie den Abstand vom Boden bis zum Beginn der Kniebeuge, am besten mit den Schuhen, die Sie normalerweise zuhause tragen. Im Stehen müssen die Beine gestreckt sein, im Sitzen im rechten Winkel. Ihre kompletten Fußsohlen berühren den Boden. Lassen Sie sich dabei helfen, zu zweit geht es einfacher.

Vergleichen Sie Ihre Messung mit der folgenden Tabelle und Sie finden den für Sie passenden Wohnraumrollator.

Unterschenkelänge (A)	< 48 cm	< 52 cm	> 52 cm	> 52 cm
Ihr passender Rollator	WR52	WR55	WR58	WRXL

Sind Ihre Maße nicht genau einer Rollatorgröße zuzuordnen?  
 Unser Vertriebs- und Serviceteam berät Sie gerne unter Tel. 08141 317740  
 oder Sie schreiben eine E-Mail an [hallo@saljol.de](mailto:hallo@saljol.de).



## 2. Überwiegend als Rollator

Sie möchten Ihren Rollator vorwiegend zum Schieben und Laufen in Ihrem Zuhause nutzen? Dann benötigen Sie folgende Maße:

### Ihre Körpergröße (B)

Messen Sie Ihre gesamte Körpergröße, am besten mit den Schuhen, die Sie normalerweise zuhause tragen. Lassen Sie sich dabei helfen, zu zweit geht es einfacher.

Vergleichen Sie Ihre Messung mit der folgenden Tabelle und Sie finden den für Sie passenden Wohnraumrollator.

Körpergröße (B)	145–165 cm	150–180 cm	170–200 cm	170–210 cm
Ihr passender Rollator	WR52	WR55	WR58	WRXL

Sind Ihre Maße nicht genau einer Rollatorgröße zuzuordnen?

Unser Vertriebs- und Serviceteam berät Sie gerne unter Tel. 08141 317740 oder Sie schreiben eine E-Mail an [hallo@saljol.de](mailto:hallo@saljol.de).



## Technische Daten

<b>Wohnraumrollator</b>	<b>WR52</b>	<b>WR55</b>	<b>WR58</b>	<b>WRXL</b>
Empfohlene Körpergröße	145–165 cm	150–180 cm	170–200 cm	170–210 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg
Griffhöhe	80 cm	86 cm	92 cm	95 cm
Sitzhöhe	52 cm	55 cm	58 cm	58 cm
Breite unten (Rad)	56 cm	56 cm	56 cm	68 cm
Breite oben	51 cm	51 cm	51 cm	65 cm
Abstand zwischen den Griffen	43 cm	43 cm	43 cm	60 cm
Gewicht Velvet Grey & Ivory White ohne Zubehör	10,4 kg	10,8 kg	11,2 kg	13,4 kg
Gewicht Diamond Silver ohne Zubehör	9,3 kg	9,5 kg	9,7 kg	
Kompatibel mit Zubehör	✓	✓	✓	

**Der Wohnraumrollator WRXL ist auf Anfrage in Velvet Grey und Ivory White erhältlich.**

Sind Ihre Maße nicht genau einer Rollatorgröße zuzuordnen?

Unser Vertriebs- und Serviceteam berät Sie gerne unter Tel. 08141 317740 oder Sie schreiben eine E-Mail an [hallo@saljol.de](mailto:hallo@saljol.de).